



Masque Barrière en tissu lavable et réutilisable

AFNOR SPEC S76-001

Protection de haute qualité

Economique

Conçu pour être lavé et réutilisé 20 fois (le prix de revient à l'usage est faible)

Produit durable

Plus écologique que les masques jetables

Solidaire

Nous reversons 1% de nos ventes aux services de santé, aux armées et à des associations et collectivités.

Fabrication française

Basée sur le savoir faire et l'expertise de la Toile du Boulanger, le spécialiste des textiles techniques pour la Boulangerie



Caractéristiques

Masque en complexe de matériaux

Composition : Coton, Lin,

Cordon en élasthanne

Poids : 16g

Dimensions à plat : environ 21 x 10 cm (bec) ou 19 x 8 cm (plis)

épaisseur : 5 mm

Patron AFNOR SPEC S76-001

Test au porter pendant 4 heures réalisé par nos soins

Domaine d'utilisation

Ce masque est exclusivement réservé à des usages non sanitaires. Il est destiné à prévenir les projections de gouttelettes et leurs conséquences. L'utilisation de ce masque s'inscrit dans la stricte application des mesures liées au confinement ainsi que des gestes barrières. Ce masque individuel n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients.



La Toile du Boulanger - 11 Av. du vent des Dames - 13400 Aubagne

www.masqueinfrance.fr

contact@masqueinfrance.fr





Masque Barrière en tissu lavable et réutilisable

AFNOR SPEC S76-001

Notice d'Utilisation

Recommandations de manipulation des masques :

- Avant de porter un masque, bien se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique.
- Appliquer le masque de façon à recouvrir le nez et la bouche et veiller à l'ajuster au mieux sur le visage • Vérifier l'absence de jet d'air dans les yeux lors d'une expiration forte
- Lorsque l'on porte un masque, éviter de le toucher et de déplacer le masque
- Chaque fois que l'on touche un masque usagé, se laver les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique
- Si besoin de boire ou de manger, changer de masque
- Lorsqu'il s'humidifie, le remplacer par un nouveau masque
- Si vous éprouvez des difficultés à respirer, enlevez le masque



Pour retirer le masque : l'enlever par derrière (ne pas toucher le devant du masque) ; le jeter immédiatement dans une poubelle fermée ou dans un sac prévu à cet usage ; se laver les mains avec de l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique.



Entretien du masque :

Après utilisation, le masque doit être isolé soit pour être jeté soit pour être lavé. Il est recommandé d'isoler le masque dans un sac plastique à jeter après usage ou dans un sac réutilisable à laver. Dans le cas du sac réutilisable, masque et sac peuvent être lavés ensemble et dans ce cas, sortir le masque du sac.

Cycle de Lavage :

Faire un cycle de lavage avant la première utilisation
Lavage en machine à 60°C avec détergent classique
Séchage en tambour ou à l'air
Repassage à 120°C

Ce masque a été conçu pour être réutilisé et lavé 20 fois

Le temps de port du masque est limité à 4 heures



La Toile du Boulanger - 11 Av. du vent des Dames - 13400 Aubagne

www.masqueinfrance.fr

contact@masqueinfrance.fr

